

## نحوه استفاده از دستگاه: Resmed Lumis 150



- ۱- دکمه خانه جهت بازگشت به صفحه اصلی دستگاه
- ۲- دکمه خاموش و روشن کردن دستگاه
- ۳- کلید قابل تغییر جهت تغییر اطلاعات
- ۴- خروجی هوا برای اتصال به تیوب هوا

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۲۵۰۵۵۵

لینک تلگرام: @EDP\_Official

آدرس سایت: www.ehyadarman.com

## نحوه استفاده از دستگاه

	<p>۱- دستگاه خود را در یک حالت ثابت و مناسب قرار دهید. سپس با بالا آوردن محافظ ورودی منبع برق دستگاه ورودی منبع برق را باز کنید.</p>
	<p>۲- کابل پاور دستگاه را مطابق شکل به محل آن در پشت دستگاه متصل کنید و سپس محافظ ورودی منبع برق را با پایین آوردن به حالت اول خود برگردانید.</p>
	<p>۳- تیوب هوای دستگاه را مطابق شکل با دقت و با احتیاط در قسمت مشخص شده در پشت دستگاه متصل کنید.</p>
	<p>۴- قسمت آزاد تیوب هوا را با دقت و با احتیاط به ماسک متصل کنید و سپس دکمه روشن شدن دستگاه را انتخاب کرده و از دستگاه استفاده کنید.</p>

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۲۵۰۵۵۵

لینک تلگرام: @EDP\_Official

آدرس سایت: www.ehyadarman.com

## نحوه اتصال مرطوب کننده به دستگاه

اگر دستگاه AirCurve™ VAuto را به همراه مرطوب کننده به نام HumidAir™ تهیه کردید میبایست مراتب زیر را انجام دهید.

	<p>۱- درب مرطوب کننده HumidAir™ را باز کرده و آن را پر از آب کنید تا به خط نشان حداکثر یا MAX برسد.</p>
	<p>۲- درب مرطوب کننده HumidAir™ را بسته و آن را به قسمت کناری تعبیه شده در دستگاه متصل کنید.</p>

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۲۵۰۵۵۵

لینک تلگرام: @EDP\_Official

آدرس سایت: www.ehyadarman.com

## تنظیمات اولیه دستگاه

اگر اولین بار است که از دستگاه استفاده می کنید، می بایست از طریق کارشناسان مورد تایید اقدامات لازم را انجام دهید و بعد از آموزش شما بعد از یک الی دو هفته استفاده از دستگاه دیگر به راحتی می توانید از آن استفاده کنید.

- برطرف کردن علائم دستگاه با تغییر آسان تنظیمات:

۱- مشکل به خواب رفتن: در این حالت اگر مشکلی با فشار بالا داشتید Ramp Time را روشن کرده و در صورت روشن بودن آن را افزایش دهید.

۲- اگر در هنگام فرو بردن هوا مشکل داشتید می بایست Ramp Time را روشن و در صورت روشن بودن آن را افزایش دهید.

۳- اگر حس می کنید هوای کافی دریافت نمی کنید می بایست Ramp Time را خاموش کنید.

جهت تغییر Ramp Time می بایست اقدامات زیر را انجام دهید:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۲۵۰۵۵۵

لینک تلگرام: @EDP\_Official

آدرس سایت: www.ehyadarman.com

	<p>۱- گزینه My Options را انتخاب کنید.</p>
	<p>۲- همانطور که در شکل مشخص است باید گزینه Ramp Time را انتخاب کنید.</p>
	<p>۳- در این قسمت می توانید میزان Ramp Time را بر اساس نیاز تغییر دهید.</p>
	<p>۴- با انتخاب این گزینه تنظیمات ذخیره می شود.</p>

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۲۵۰۵۵۵

لینک تلگرام: @EDP\_Official

آدرس سایت: www.ehyadarman.com